

EASYEXO

BISKO



Exoskelettet, eller aflastningsselen, er nemt at bruge, og giver din krop en ekstraordinær fordel, ved at aflaste lænden.

Du vil opleve mindre smerter, mindre belastning og mere overskud i hverdagen.



På grund af dens lille kontur, kan systemet nemt bæres under f.eks. arbejdstøjet. Bærekomforten øges yderligere ved hjælp af tilpassede justeringsmuligheder og åndbare tekstiler.



er en blød rygstøttende sele, designet til vedvarende eller gentagne arbejde. Aflastningsselen giver hjælp til forover bøjede stillinger og løfteopgaver, samtidig med at det beskytter lænden og reducerer risikoen for muskelskeletlidelser på grund af træthed og overbelastning.



er hovedsageligt lavet af tekstiler, med et elastisk metalskelet. Den patenterede letvægts metal-tekstil-baserede differentiale mekanisme, sikrer brugernes frie bevægelse. EASYEXO BACK giver god bevægelighed ved f.eks. gang, og gør kontinuerlig drift mulig ved automatisk at skifte mellem bøjningsassisterende og fritgående tilstand.

Specifikationer:

Produktvægt	0,71 kg
Vejledende kropsvægt	≤ 100 kg
Anbefalet højde:	165 -190 cm
Kønsbegrænsning:	Ingen
Rygmuskulatur support	21 kg (maks.)
Materiale	7075 aluminium, fjederstål, nylon, latex

Brugervejledning

Da **BISKO** er lavet af fleksibelt materiale, anbefales bukser lavet af stof med en vis friktion svarende til arbejdstøj, mens du bærer selen. Bukser med lav friktion vil medføre, at benremmene glider og reducerer kraftudgangen.

- 1: Tag BISKO på som en rygsæk og spænd remmen over brystet.
- 2: Sæt remmene omkring låret ved at overlappe enderne.
- 3: Juster stropperne under armene.
- 4: Træk i remme på ryggen for at stramme det elastiske bånd.

KLAR TIL BRUG

- 5: Løft i spændet for at løsne trækket i elastikken



Se flere videoer på YouTube [HER](#)